

Для дезинфекции/стерилизации  
медицинских инструментов

# ***Aceside***

**Комплекты лотков для дезинфекции и стерилизации изделий  
медицинского назначения с использованием препарата АСЕСАЙД**



**Комплект лотков для  
обработки инструментов AS-10 (10 л)**



**Комплект лотков для  
обработки инструментов AS-5 (5 л)**



**Комплект лотков для  
обработки инструментов AS-3 (3 л)**

**Удобное и эффективное решение для быстрой дезинфекции и  
стерилизации медицинских инструментов**

Лотки предназначены для проведения комплексной обработки изделий медицинского назначения (ИМН) ручным способом. В каждый комплект входит 2 лотка - лоток для предварительной/предстерилизационной очистки и лоток для дезинфекции/стерилизации ИМН. Лотки специально предназначены для обработки ИМН с использованием дезинфицирующего средства на основе надуксусной кислоты АСЕСАЙД (дезинфекция – 5 минут, стерилизация – 10 минут при 18 °С).

## Комплект лотков AS-10 (10 л)



Лоток для замачивания в рабочем растворе АСЕСАЙД

Наименование	Комплект лотков AS-10 (10 л)
Артикул	42223
В комплекте	таймер, сливной шланг, дез. насадка
Размер (ШхГхВ, мм)	432 x 319 x 195

## Комплект лотков AS-5 (5 л)



Лоток для замачивания в рабочем растворе АСЕСАЙД

Наименование	Комплект лотков AS-5 (5л)
Артикул	42241
В комплекте	таймер, дез. насадка
Размер (ШхГхВ, мм)	376 x 226 x 161

## Комплект лотков AS-3 (3 л)



Лоток для замачивания в рабочем растворе АСЕСАЙД

Наименование	Комплект лотков AS-3 (3л)
Артикул	42251
В комплекте	таймер
Размер (ШхГхВ, мм)	342 x 217 x 157


## Уникальные особенности лотков:

- Съёмная прозрачная пластиковая крышка, плотно прилегающая к лоткам, для удобного визуального контроля процесса обработки и предотвращения распространения запаха средства
- Специальные заливные отверстия на крышках лотков AS-5 (5 л) и AS-10 (10 л) для легкого и безопасного добавления Реагента 1 препарата АСЕСАЙД при приготовлении рабочего раствора
- Съёмная насадка для дезодорирующего абсорбента (поставляется в комплекте со средством АСЕСАЙД) для установки на крышке лотков AS-5 (5 л) и AS-10 (10 л)
- Специальный сливной шланг в комплекте для лотков модели AS-10 (10 л) для легкого слива рабочего раствора через специальный клапан в нижней части лотков
- Удобные пластиковые сетки для погружения инструментов в рабочий раствор, переноса инструментов между лотками и ополаскивания инструментов в комплекте во всех моделях лотков
- Таймер с кнопками для установления времени дезинфекции (5 минут) и стерилизации (10 минут) в комплекте во всех моделях лотков. Таймер издает звуковой сигнал после окончания времени дезинфекции или стерилизации. Магнит на задней стороне таймера позволяет закреплять его на вертикальных стальных поверхностях

## Приготовление рабочего раствора средства АСЕСАЙД

Объем рабочего раствора	Модель лотков	Объем средства АСЕСАЙД
10 л	AS-10 (10 л)	комплект АСЕСАЙД 500 мл (Реагент 1 и Реагент 2) + 9 л воды
5 л	AS-5 (5 л)	комплект АСЕСАЙД 250 мл (Реагент 1 и Реагент 2) + 4,5 л воды

\* Лоток для замачивания AS-10 (10 л) снабжен сливным отверстием и выемкой для таймера на крышке

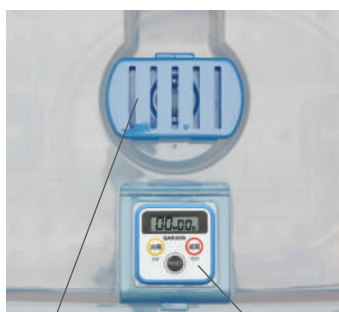

Насадка для дезодорирующего абсорбента  
Таймер



Поместите дезодорант, прилагающийся к АСЕСАЙД, в дезодорирующую насадку для подавления характерного запаха раствора АСЕСАЙД




Установленное время дезинфекции (5 минут)  
Установленное время стерилизации (10 минут)  
Кнопка перезагрузки



## Приготовление и использование рабочего раствора препарата АСЕСАЙД для ручной обработки инструментов

### Предварительная или предстерилизационная очистка инструментов

Выполните очистку с использованием моющего средства, зарегистрированного в Российской Федерации и разрешенного для использования в медицинских профилактических учреждениях.

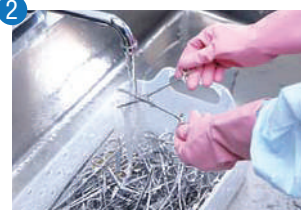

Перед подготовкой к дезинфекции / стерилизации рабочим раствором АСЕСАЙД наденьте средства индивидуальной защиты, например, защитные очки, перчатки из ПВХ или резиновые, защитную маску или респираторы универсального типа РПГ 67 или РУ 60М с патроном марки В, защитный халат.



Защитные очки  
Маска  
Халат  
Резиновые перчатки



# Для дезинфекции/стерилизации медицинских инструментов

# Acecide

## Метод приготовления рабочего раствора АСЕСАЙД (10 л)



1 Налейте 9 л очищенной или чистой питьевой воды до деления шкалы в специальном лотке для замачивания.



2 Налейте Реагент 2 (500 мл), перемешайте и закройте лоток крышкой.



3 Отсоедините насадку для дезодоранта от центральной части крышки, поворачивая ее против часовой стрелки.



4 После отсоединения насадки для дезодоранта вставьте флакон с Реагентом 1 (500 мл) колпачком в отверстие в центре крышки.



5 Поверните флакон с Реагентом 1 по часовой стрелке. Реагент 1 перельется в лоток.



6 Удалите пустой флакон из-под Реагента 1, повернув его против часовой стрелки. Во время операции соблюдайте осторожность, избегая попадания капель раствора на окружающие предметы.



7 Пустые флаконы поместите в пакет, в котором они содержались, закройте пакет и утилизируйте.



8 Поместите дезодорирующий абсорбент, поставляющийся в комплекте со средством АСЕСАЙД, в насадку и установите ее назад на крышку лотка.

### Меры предосторожности при хранении и приготовлении раствора

- В колпачке флакона с Реагентом 1 имеется дегазирующий клапан. Храните флакон с Реагентом 1 строго в вертикальном положении во избежание пролива средства.

- Приготовление рабочего раствора АСЕСАЙД необходимо осуществлять в хорошо вентилируемом помещении.

- После добавления Реагента 1 рекомендуется перемешать раствор (например, стальной палочкой) или подождать 10-15 минут для достижения равномерной концентрации надуксусной кислоты в объеме рабочего раствора.

## Дезинфекция и стерилизация инструментов в рабочем растворе препарата АСЕСАЙД (10 л)

### Проверка концентрации



1 Перед использованием рабочего раствора АСЕСАЙД с помощью тест-полосок проверьте, что концентрация надуксусной кислоты в растворе превышает минимальную эффективную концентрацию (0,2%). При приготовлении свежего рабочего раствора его необходимо перемешать или подождать 10-15 минут перед проверкой концентрации надуксусной кислоты.

### Дезинфекция / стерилизация



2 После проведения очистки медленно погрузите медицинские инструменты в рабочий раствор препарата АСЕСАЙД. Погружать инструменты следует осторожно во избежание образования воздушных пузырей на поверхности инструментов. Инструменты, имеющие замковые части, должны быть раскрыты. Каналы и полости инструментов, в случае их наличия, должны быть заполнены рабочим раствором при помощи шприца или помпы.



3 Время дезинфекции в рабочем растворе препарата АСЕСАЙД (включая ДВУ) – 5 минут, стерилизации – 10 минут. После погружения инструментов включите таймер. После звукового сигнала таймера достаньте инструменты из рабочего раствора. Длительное пребывание (более 30-60 минут) в рабочем растворе может привести к их повреждению.

### Промывание водой



4 Тщательно промойте медицинские инструменты водой. В зависимости от типа обработки рекомендуется использовать проточную питьевую воду (при дезинфекции) или стерильную воду (при стерилизации). Наличие надуксусной кислоты в оставшихся после промывания каплях воды можно проверить с использованием индикаторной йодкрахмальной бумаги – если бумага изменила цвет на сине-фиолетовый, повторите промывание. После промывания насухо вытрите медицинские инструменты.

### Слив



5 После истечения срока годности раствора (через 7 дней после приготовления, в случае отрицательного результата при проверке тест-полоской или при появлении видимых изменений) для его утилизации присоедините сливной шланг к клапану лотка (при этом начнется слив раствора) и закрепите его в коннекторе, вращая по часовой стрелке. Сливающийся в канализацию раствор рекомендуется разбавлять большим количеством воды.

## Представительство компании Saraya в России:

ООО «Сарая СНГ»

115054, Москва, ул. Зацепы, д. 28, стр. 1

Тел.: +7 (499) 235-33-66, 8-800-250-19-69 (бесплатно по России)

www.saraya-cis.ru, saraya-shop.ru, info@saraya-cis.ru

**SARAYA**